

# Deutsch

**DE: Danke, dass Sie sich für den Bathmate® entschieden haben:** Wir haben dieses Produkt so konstruiert, dass Sie es für viele Jahre zuverlässig benutzen können. Über zehn Jahre Erfahrung in der Konstruktion und über 60 Jahre gesammelter Erfahrung im Design und Herstellung von hoch qualitativen Konsumgütern haben den Bathmate® zu einem weltweit führenden Hersteller auf diesem Gebiet gemacht. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit um diese Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen. Denn wir wollen, dass Sie Ihren neuen Bathmate® bald in vollen Zügen genießen können.

**Sicherheitshinweise:** Bitte lesen Sie diese Hinweise vollständig und sorgfältig bevor Sie den Bathmate benutzen.

- Bitte laden Sie die komplette Gebrauchsanleitung von unserer Webseite herunter und geben diese jedem Benutzer des Produkts.
- Bitte reinigen Sie Ihren Bathmate® mit den Bathmate® Reinigungstabletten, falls Sie das Produkt mit einer anderen Person benutzen wollen. Dies gewährleistet eine hygienische Benutzung und Ihre persönliche Sicherheit.
- Bitte benutzen Sie den Bathmate® nicht in Situationen die besondere Aufmerksamkeit verlangen (z.B. während des Autofahrens oder wenn Sie einen Säugling oder ein Kind beaufsichtigen)
- Bewahren Sie den Bathmate® immer in trockenem Zustand und bei Raum Temperatur auf.
- Benutzen Sie den Bathmate® mit Sorgfalt und lagern ihn an einem sicheren Ort, so dass er nicht auf harte Oberflächen fallen kann.
- **Bestimmungsgemäße Verwendung des Bathmate®**
- "Bestimmungsgemäße Verwendung" bedeutet, dass der Bathmate nur innerhalb der Betriebsbedingungen und Beschränkungen benutzt werden darf, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind.
- "Unschonemäßiger Gebrauch" bedeutet der Gebrauch auf eine andere Art und Weise als in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, oder unter anderen Betriebsbedingungen die von den hier beschriebenen abweichen.

**Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.** Vor Kindern fernhalten; da das Produkt kleine, verschluckbare Teile beinhaltet wenn es demontiert wird. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt benutzen, es ist ratsam einen Arzt zu konsultieren, dies gilt besonders bei folgenden Vorerkrankungen: **Herz und Lungen Krankheiten, hoher Blutdruck, Gehirnschlag, Epilepsie, unkontrollierter Diabetes oder Krampfanfälle sowie Erkrankungen des Urogenitalsystems wie zum Beispiel Nieren, Blasen, Hoden oder Penis Erkrankungen.**


Jeder Benutzer dieses Produkts der Nebenwirkungen bekommt sollte sofort den Gebrauch beenden und einen Arzt konsultieren. Nicht demontieren sofern Sie nicht die Gebrauchsanleitung gelesen haben. Entsorgen Sie das Produkt bei einer Entsorgungsstelle.

Die Lieferung des Bathmate® beinhaltet:

- 1 x Bathmate® Hydropumpe
- 1 x Gebrauchsanleitung
- 1 x Zuwachs Anzeige

**Die Lieferung des Bathmate® Reinigungs-Kit beinhaltet:**

- 1 x Aufbewahrungsbeutel
- 2 x Schwamm
- 1 x Bürstestiel
- 8 x Reinigungstabletten
- 1 x Kondomhalter
- 2 x Kondom
- 1 x Frottiertuch
- 1 x Zuwachs Messanzeige
- 1 x Halteband für die Dusche (optional)

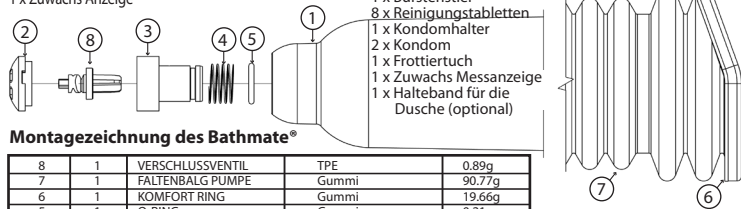

Montagezeichnung des Bathmate®

ANZAHL	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MATERIAL	GEWICHT
8	1	VERSCHLUSSVENTIL	TPE	0.89g
7	1	FALTENBALG PUMPE	Gummi	90.77g
6	1	KOMFORT RING	Gummi	19.66g
5	1	O-RING	Gummi	0.21g
4	1	FEDER	Edelstahl	0.48g
3	1	VENTILGEHÄUSE	Polykarbonat, Klar	6.61g
2	1	VENTILDECKEL	Polykarbonat, Klar	2.77g
1	1	GEHÄUSE	Polykarbonat, Klar	108.23g

## Technische Einzelheiten

	Hercules	Goliath
Gewicht:	250g	330g
Breite: Oben/Unten (Außendurchmesser)	24 min./84 max.	24 min./115 max.
Länge:	296mm	350mm
Maximaler Penis Umfang:	46mm	65mm
Maximaler Penis Länge:	200mm	260mm
Dauer der Anwendung:	20min	20min
Maximale Anzahl der Anwendung:	täglich	täglich
Max. Vakuum Luft:	-0.17 bar	-0.17 bar
Max. Vakuum Wasser:	-0.40 bar	-0.40 bar

**Der Bathmate®** - wird aus hochwertigen Materialien hergestellt : Polykarbonat, hautfreundlichem Gummi sowie Edelstahl.

**Hersteller Erklärung:** Die Garantiedauer für dieses Bathmate® Produkt beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum. Ausgeschlossen sind Zubehörteile die mit oder getrennt vom Bathmate® geliefert wurden. Aufgrund der Eigenschaften dieser Zubehörteile, haben diese eine kürzere Lebensdauer die abhängig von der Häufigkeit der Benutzung ist.

- Die Garantiedauer beginnt ab dem Datum des Kaufs. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen die Aufbewahrung des Rechnungsbelegs als Kaufnachweis. Ohne diesen Kaufnachweis ( der vom zuständigen Bathmate® Service Partner geprüft wird) kann leider keine Erstattung von Reparaturkosten erfolgen.
- Abhängig von Ihrer Wahl umfasst der Garantieservice, die Behebung von Material und Produktionsmängeln durch Reparaturen oder Ersatzlieferung von Einzelteilen oder der kompletten Einheit.
- Unschonemäßiger Gebrauch (z.B.vorsätzliche Beschädigung, herunterfallen des Produkts, unsachgemäße Demontage oder Montage) normale Abnutzung, höhere Gewalt und Defekte die bei dem Kauf bereits bekannt waren sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie wird ungültig wenn das Produkt in irgendeiner Weise von einer unautorisierten Person oder manipuliert wird.
- Im Falle einer Forderung unter den Bedingungen dieser Garantie, senden Sie das Gerät bitte an Ihren zuständigen Service Partner. Um Transportschäden zu vermeiden bitten wir sie falls möglich die Originalverpackung zu benutzen.
- Ihre rechtlichen Ansprüche gegen den Verkäufer, die sich aus dem Verkaufsvertrag ergeben, werden durch diese Garantie nicht beeinflusst. Die Garantie kann in allen Ländern außerhalb der E.U. oder U.S.A. in Anspruch genommen werden, vorausgesetzt, dass kein nationales Recht die Bedingungen der Garantie beschränkt.

**CE Konformitätserklärung:** Dieses Gerät stimmt überein mit den grundlegenden Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen der EU Richtlinie 89/336/EC. Die Konformitätserklärung ist unter [www.bathmate.eu](http://www.bathmate.eu) veröffentlicht.

**Falls Sie das Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Vorschriften und Bestimmungen.**

**Umweltschutz Erklärung:** Ihr Bathmate wurde aus hochwertigen Materialien entwickelt und produziert und dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung am besten bei Ihrer lokalen Entsorgungsstelle getrennt vom normalen Hausmüll stattfinden sollte. Das hilft die Umwelt zu schützen in der wir alle Leben.

**Danke!**

**Anmerkung** – Die Auswahl der richtigen Größe ist sehr wichtig. Der Bathmate® funktioniert so ähnlich wie ein Taucheranzug, der sich an die Haut anschmiegt, isoliert durch eine Schicht warmen Wassers. Dieses Konstruktionsprinzip gilt auch für den Bathmate®, wenn die Hydropumpe zu groß für den Penis ist, kann das Peniswachstum und die Abdichtung gefährdet sein. Der errigierte Penis reduziert das Wasservolumen im inneren der Kammer und diese Balance reduziert das Gewichtsverhältnis, Wärmeverlust und den internen Unterdruck. Die Wärme des Wassers öffnet und erweitert die Blutzufuhr in den Adern, dadurch fließt nährstoffreiches Blut langsam in den Penis und das Penishautgewebe. Vergewissern Sie sich wenn Sie den Bathmate® kaufen, dass sie die Orientierungshilfe für die Größentabelle lesen, dies wird Ihnen den bestmöglichen Komfort und Zuwachs in Länge und Umfang geben.

### Gebrauchsanleitung für das Bathmate® Halteband für die Dusche

Das Bathmate® Halteband für die Dusche wurde speziell für maximale Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit entwickelt und gewährleistet den besten Komfort wenn der Bathmate® unter der Dusche oder im Bad benutzt wird. Das Band kann um den Hals oder über der Schulter befestigt werden und gewährleistet damit vollen Zugriff auf alle Körperregionen während Sie Duschen oder Baden

### Gebrauch des Bathmate® im Bad – Ihre Schritt für Schritt Anleitung

Wir empfehlen Ihnen den Bathmate® zuerst in Ihrer Badewanne zu gebrauchen um optimalen Komfort und die beste Leistung zu erfahren.

- Baden Sie zuerst für fünf Minuten um Ihren Hodensack (Skrotum) und Ihre Hoden zu entspannen Danach lockern Sie Ihren Penis durch leichtes Vorspiel. Versichern Sie sich, dass das Wasserstand in Ihrer Badewanne ausreichend hoch (etwa Hüfthoch) ist um den Gebrauch in entspannter zurückgelehnter Haltung zu gewährleisten.
- Füllen Sie den Bathmate® mit Badewasser und positionieren Sie die Hydropumpe mit der Abschragung nach unten über den Penis in Richtung Peniswurzel. Positionieren sie den Hodensack und die Hoden so, dass Sie einen guten Komfort und Abdichtung erreichen.
- Während der Bathmate® nach oben gerichtet ist und mit Wasser gefüllt ist umfassen sie ihn und drücken ihn herunter, gegen Ihren Körper, dadurch wird Wasser aus dem inneren der Hydropumpe nach außen befördert. Durch das fehlende Wasser wird ein Unterdruck erzeugt und der Penis vergrößert sich.
- Der Faltenbalg der Hydropumpe ist so konstruiert, dass er langsam versucht seine Original Größe zu erreichen, dadurch können sie die Pumpe erneut betätigen und so erhöht sich der Unterdruck und damit die Größe Ihres Penis. (Zu schnelles erweitern der Blutgefäße und zu schneller und hoher Unterdruck können Hautrötungen, rote Punkte und das Aussehen eines Blutergusses erzeugen; das ist üblich wie bei jeder konventionellen Luftpumpe die dem Benutzer erlaubt kontinuierlich zu pumpen). **Nur der Bathmate® erlaubt Ihnen langsames kontrolliertes Wachstum mit schrittweiser Erhöhung des Unterdrucks. Nur wenn der Benutzer die maximale normale Penislänge erreicht hat beginnt der Bathmate® seine überlegene Hydrokraft (Wasserkraft) voll auszunutzen, die ihn zu der bei weitem sichersten und bequemsten Pumpe weltweit machen.**
- Bis Sie Ihre maximale normale Größe erreicht haben, ist es nötig das Gerät während des Gebrauchs festzuhalten oder das Halteband für die Dusche / Bad zu benutzen. Wenn die maximale Größe erreicht ist wirken die maximalen Wasserkraft, so wird ihr Penis sicher vergrößert. Vergessen Sie nicht wenn der Unterdruck zu stark ist können Sie einfach das Ventil am oberen Teil des Bathmate® herunter drücken, wodurch das Vakuum und damit auch das Druckempfinden verringert wird. (Aufgrund des großen Wasservolumens dichtet und sitzt der Bathmate® nur gut wenn das maximale Vakuum erreicht ist.)
- Wenn Ihr Penis sich vergrößert und ausweitet werden Sie bemerken, das sie kleinere Wassermengen aus dem Ventil hinauspressen können. Dies zeigt, dass ihr Penis wächst und sich ausweitet. Dieses Volumen beträgt bei den meisten Anwendern ca. einen Eierbecher voll Wasser während einer 20 minütigen Anwendung. Diese Volumenzunahme an Blut erlaubt dem Penis sich auf natürliche Weise bei ihrer nächsten Erektion zu vergrößern, und zwar um die gleiche Volumenmenge .

### Gebrauch des Bathmate® unter der Dusche – Ihre Schritt für Schritt Anleitung

Der Gebrauch des Bathmate® unter der Dusche im Gegensatz zur Anwendung in der Badewanne erfordert einige einfache extra Maßnahmen:

Duschen Sie zuerst für fünf Minuten um Ihren Hodensack und die Hoden zu entspannen. Platzieren sie das Halteband um den Hals und regulieren es auf eine komfortable Länge. Aber verbinden sie das Halteband noch nicht mit dem Bathmate. Halten Sie den Bathmate mit der Öffnung nach oben und befüllen ihn bis zum Rand mit Wasser. Dabei

drücken sie eine Hand unter das nun nach unten weisende Ventil, um das heraus laufen des Wasser während des befüllen zu vermeiden. Führen sie den schlaffen Penis in den immer noch umgedrehten Bathmate® ein. Platzieren Sie den Bathmate® über dem Penis mit den Hoden außerhalb und der Abschragung nach unten. Jetzt können sie auf die übliche Art ein Vakuum erzeugen, indem sie den Bathmate gegen ihr Becken drücken, wobei der Faltenbalg komprimiert wird. Sie können den Druck auch dadurch erhöhen, dass sie den Bathmate® gegen eine stabile Wand ansetzen und mit den Hüften zustoßen.

Anmerkung: Wenn Sie den Bathmate® Hercules gekauft haben können sie ihn auch mit einen halb errigiertem Penis benutzen. Dies vermindert das Gewicht des Wassers während der Benutzung.

Während des pumpen lehnen Sie sich bitte ein wenig nach hinten um eventuell eingeschlossene Luft zu entfernen. Befestigen Sie das Halteband für die Dusche am oberen Ende des Bathmate® durch einhaken.

Jetzt können Sie komfortabel duschen während der Bathmate® Ihren Penis vergrößert. Sie können mit dem installiertem Halteband weiter pumpen um Ihren Penis zu trainieren und zu vergrößern. Wenn Sie die Anwendung beenden möchten drücken Sie das Ventil herunter dadurch entweicht der Unterdruck und Sie können den Bathmate einfach und leicht von Ihrem Penis entfernen. Um das Produkt in optimalem Zustand zu halten empfehlen wir Ihnen den Bathmate® nach dem Gebrauch zu reinigen, so wie es in der Reinigungsanleitung beschrieben ist.

### Gebrauchsanleitung für die Bathmate® Penis-Messanzeige

Die Penis-Messanzeige erlaubt ihnen eine exakte Messung ihrer Penislänge und -umfang in metrischen und traditionell britischen Maßeinheiten. Um die Länge des Penis zu messen, platzieren sie das Maßband an der Seite Ihres Penis mit dem oberen Ende des Maßband über Ihre Peniswurzel. Jetzt können sie die Länge ablesen. Wählen Sie die entsprechende Seite mit metrischen oder traditionell britischen Maßeinheiten aus. Um den Umfang zu messen halten sie das Maßband vor Ihren Penis bis der abgeschragte Ausschnitt ungefähr mit Ihrer Größe übereinstimmt. Jetzt können sie die Messanzeige vorsichtig über ihren Penis ziehen und locker sitzend anpassen. Dadurch erhalten sie eine Messanzeige ihres Penisumfangs, die wahlweise in metrischem oder traditionell britischen Einheiten abgelesen werden kann. **WICHTIG!** Schieben Sie Ihren Penis im inneren der Messanzeige nicht auf ein, da es sich unangenehm anfühlen kann.

### Gebrauchsanleitung für die Reinigungsbürste mit auswechselbarem Schwamm.

Die Penis-Reinigungsbürste wurde speziell für die hygienische Reinigung der Bathmate® Hydropumpen entwickelt. Das Design beinhaltet einen austauschbaren hygienischen Schwamm der so geformt ist, dass Sie die inneren und schwer erreichbaren Teile des Faltenbalgs und der Hydropumpenkammer erreichen können. Die Konstruktion des Stiel erlaubt dem Benutzer zwei Haltepositionen, eine kurze um das innere des Faltenbalgs zu reinigen und eine lange Haltung um die innere Kammer und das obere Ende in der Nähe des Ventils zu reinigen. Um den Schwamm zu ersetzen einfach im rechten Winkel von dem geteilten Schwamm ziehen. Um den neuen Schwamm einzusetzen drücken sie den Schwamm mit zwei Fingern zusammen und ziehen den Schwamm gleichmäßig zwischen den gabelförmigen Enden, gleichzeitig halten sie den Schwammstiel stützend fest. Wenn der Schwamm die Unterkante der Stiel-Finger erreicht hat, ziehen Sie die Seiten des Schwamm in die Mitte. Der Schwamm ist nun bereit zum Gebrauch, bitte lesen sie die komplette Reinigungsanleitung um den größtmöglichen Genuss mit Ihrer Bathmate® Hydropumpe zu haben.

### Warnhinweis:

- Benutzen Sie den Bathmate® maximal 20 Minuten und achten Sie darauf sich niemals Unbehagen zu bereiten. Falls der Bathmate® nicht gut sitzt oder abdichtet, entfernen Sie ihn einfach und platzieren ihn erneut in einer angenehmen und komfortablen Position.
- Die Entwicklung des Penis bezüglich Vergrößerung oder Leistungssteigerung wird nur durch die Zeit und Geduld des Benutzers erreicht. Wundermittel existieren nicht und Firmen die sie versprechen, versprechen meist auch unmögliche Zuwachsraten die in Tagen oder Wochen erreicht werden sollen. Nehmen Sie sich Zeit entspannen Sie sich und genießen sie ihren Bathmate®.