

Svenska

Tack för att du valde Bathmate! Vi har utformat denna produkt för tillförlitlig funktion under många år. Över 60 års samlad expertis inom design och tillverkning av högkvalitativa konsumentprodukter har gjort Bathmate till ett världsledande företag inom detta område. Ägna en stund åt att läsa dessa säkerhetsanvisningar noggrant, eftersom vi vill att du ska njuta av din nya Bathmate produkt snabbt och till fullo.

Säkerhetsinstruktioner: Var vänlig läs dessa instruktioner noggrant innan du använder Bathmate.

- Ladda ner hela bruksanvisningen från vår hemsida och göra den tillgänglig för dem som använder produkten.
- För din personliga hygien och säkerhet, dela inte denna produkt med en annan person såvida du inte rengör den med Bathmate® rengöringstabletter.
- Använd inte Bathmate® i situationer som kräver särskild uppmärksamhet (t.ex. vid bilkörning).
- Se alltid till att Bathmate® förvaras torrt och ej över normal rumstemperatur när den inte används.
- Handha Bathmate® med omsorg och förvara på ett säkert sätt för att förhindra att den faller i golvet.

Användningsområde för Bathmate®

- "Avsedd användning" betyder att Bathmate bör användas inom de operativa villkor och begränsningar som beskrivs i dessa anvisningar.
- "Felaktig användning": Att använda Bathmate på annat sätt än som beskrivs i dessa anvisningar, eller enligt villkor som skiljer sig från de som beskrivs här.

Förvaras oåtkomligt för barn eftersom produkten innehåller smådelar.

Läs manualen noggrant innan användning. Varje person som upplever biverkning vid användande av denna produkt ska sluta använda den och rådgöra med sin läkare. **Använd inte om du har hjärt- och lungsjukdomar, högt blodtryck, stroke, epilepsi eller kramp, problem med urinvägar, njure, urinblåsa, testikel eller penis problem, okontrollerad diabetes.**


Ta inte isär enheten utan att först läsa manualen.

Vid leverans av Bathmate® ingår:

- 1 x Bathmate Hydropump
- 1 x Bruksanvisning
- 1 x Tillväxtmätare


Vid leverans av Bathmate rengöringskit ingår:

- 1 x Rengöring svamp
- 8 x Rengöringstabletter
- 1 x Kondomhållare
- 1 x Kondom
- 1 x Frottéhandduk
- 1 x Tillväxtmätare
- 1 x Shower Strap (tillval)
- 1 x Bruksanvisning DVD
- 1 x Digital timer
- 1 x Väska

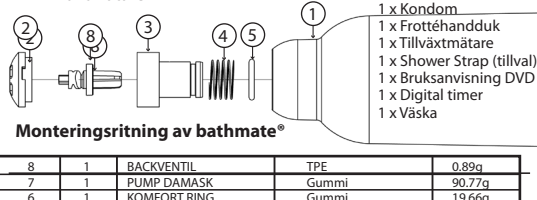

Monteringsritning av bathmate®

| 8 | 1 | BACKVENTIL | TPE | 0,89g |
|-----|-------|--------------|---------------------|---------|
| 7 | 1 | PUMP DAMASK | Gummi | 90,77g |
| 6 | 1 | KOMFORT RING | Gummi | 19,66g |
| 5 | 1 | O-RING | Gummi | 0,21g |
| 4 | 1 | EJADER | Rostfritt stål | 0,48g |
| 3 | 1 | VENTILHUS | Polycarbonate, Klar | 6,61g |
| 2 | 1 | VENTILHUUV | Polycarbonate, Klar | 2,77g |
| 1 | 1 | STOMME | Polycarbonate, Klar | 108,23g |
| DEL | ANTAL | BESKRIVNING | MATERIAL | MASSA |

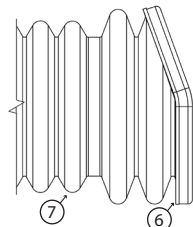

Obs - Att välja rätt storlek Bathmate är viktigast. Bathmate® fungerar som principen om en vättdrätt som omsluter kroppen, isolerad med ett skikt av värmande vatten. Denna konstruktions princip gäller också för Bathmate®, om hydropumpen är för stort för penis, kan tillväxt och tätning äventyras. När penis erigeras minskar mängden vatten som finns i kammaren och denna balans minskar enhetens totala viktförhållande och värmeförluster samt maximerar undertrycket. Värmen i vattnet öppnar svällkropparna i penis på ett säkert sätt så att de tillåts fylla på färskt, syrerikt blod i hudens vävnader. Se till att du läser måttguiden vid köp av din Bathmate®, detta säkerställer att du får högsta möjliga komfort, visuellt förbättring och tillväxt, i både längd och omkrets.

Instruktioner för bathmate® Shower Support Strap

bathmate® Shower Support Strap har designats specifikt för att hålla bathmate® på plats när du duschar eller badar så att du slipper oroa dig för att bathmate® skall lossna när du tvättar dig. Bandet kan hängas runt halsen eller axeln och tillåter dig att fritt röra dig när du duschar eller badar.

Använda bathmate® i badet – steg för steg.

- Vi rekommenderar att du till att börja med använder din bathmate® i badet för att lära dig korrekt handhavande för optimal komfort och utveckling.
- Fyll upp badet med varmt vatten tillräckligt för att täcka midjan i sittande ställning. Bada i 5 minuter för att säkerställa att huden runt testiklarna och penis slappnar av. Det är viktigt att du inte använder Bathmate® innan penis är helt avslappnad, detta för att garantera maximal komfort. Se till att det finns tillräckligt med vatten (minst till höften).
- Fyll Bathmate® med vatten och placera den mot bakenområdet med klisterlappen uppåt så att du ser den, detta minskar trycket mot testiklarna och tillåter Bathmate® att helt förseglas mot kroppen. Håll tillbaka testiklarna för att säkerställa komfort innan Bathmate® pressas ner.
- Pressa ned Bathmate® mot bakenområdet två till tre gånger eller tills du börjar känna att ett tryck byggs upp. Överskott på vatten kommer att pressas ut från ventilen i toppen av Bathmate®, detta resulterar i ett undertryck som får penis att börja växa.
- Damasken är speciellt utformad för att sakta återfå sin ursprungliga längd, vilket tillåter dig att komprimera pumpen och ytterligare öka både penis storlek och undertryck inne i kammaren. (Att skapa det undertryck alltför snabbt kan orsaka rodnad, prickar och blåmärken runt penis, vilket är vanligt förekommande med konventionella luft- penispumpar som tillåter användaren att ständigt pumpa vakuum). Bathmate® tillåter endast långsamt, kontrollerad, tillväxt och inkrementellt undertryck.
- Först när användaren har nått sin maximala normala penislängd börjar bathmate® börja generera det överlägsna hydrokraft-vakuum som gör den till den i särklass säkraste och mest bekväma penisumpen på planeten.**
- Tills du nått din högsta normala storlek är det nödvändigt att hålla enheten eller stödja den med dusch/bad bandet som support. När den är nådd kan maximal hydrokraft uppnås och din penis tvingas att expandera och växa på ett säkert sätt. Tänk på att om trycket är för högt, tryck helt enkelt på ventilen på enhetens oavsida för att minska vakuuemet. (på grund av sin stora vattenvolym, kommer bathmate® bara att förseglas stabilt när användaren har nått maximalt undertryck.)
- När som din penis nu växer och expanderar kommer du att upptäcka att du kan pressa ut små mängder vatten från toppen av enheten. Detta är den mängd vatten som motsvarar din penis storleksökning i volym. - Ungefär en äggkopp i volym för de flesta användare, under högst 20 minuter per session. Denna volymökning av blod gör penis större vid nästa erektion, ungefärligt motsvarande mängden vatten som pressats ut.

Använda Bathmate® i duschen - din steg för steg guide.

För att använda Bathmate® i duschen i motsats till badkaret måste du följa några enkla steg: Duscha en stund för att mjuka upp och slappna av penis och pung. Placera duschremmen runt nacken och justera till lagom längd, sätt inte fast den på Bathmate® ännu. Vänd på enhet och fyll upp Bathmate® med vatten, kupa handen och håll den över ventilen för att förhindra att vatten läcker ut, ventilen sluter inte tätt förrän ett undertryck har skapats.

Specifikationer

| | Hercules | Goliath |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Vikt: | 250g | 330g |
| Bredd (yttre) topp/bas: | 24 min/84 max | 24 min/115 max |
| Längd: | 296mm | 350mm |
| Max penis omkrets: | 46mm | 65mm |
| Maximal penis längd: | 200mm | 260mm |
| Varaktighet användning | 20min | 20min |
| Maximal användning | en gång per dag | en gång per dag |
| Max vakuum luft: | -0.17 bar | -0.17 bar |
| Max vakuum vatten: | -0.40 bar | -0.40 bar |

Tillverkad av högkvalitativt Polycarbonate, hudsäkert gummi och rostfria material.

Tillverkarens försäkring

Serviceinformation: Garantitiden för denna Bathmate produkt är 24 månader från inköpsdagen. Uteslutna är förbrukningsvaror samt tillbehör som levereras med produkten eller levereras separat, på grund av sina egenskaper har dessa produkter en kortare livslängd som är beroende på hur ofta de används.

- Garantitiden räknas från dagen för köpet. Av denna anledning rekommenderar vi att kvittot spara som inköpsbevis. Utan denna bevisning (som kontrolleras av ansvarig Bathmate® Service Partner) kommer du inte att ersättas för kostnader för reparationer som utförs.
- Beroende på ditt val, omfattar garantin gratis service, avlägsnande av material- och fabriktionsfel genom reparation eller utbyte av antingen enskilda delar eller hela produkten.
- Olämplig användning (t.ex. avsiktlig skadegörelse, att tappa produkten, felaktig montera isär samt felaktigt montera ihop) slitage, force majeure och fel som var kända vid tidpunkten för köpet är undantagna från garantianspråk. Garantin är ogiltig om produkten är manipulerad på något sätt av icke-behörig person eller serviceverkstad.
- När det gäller en fordran enligt villkoren i denna garanti, skicka enheten, inklusive tillbehör och kvittot till den ansvariga servicepartnern. För att minimera risken för transportskador rekommenderar vi att den ursprungliga förpackningen används.
- Dina juridiska rättigheter gentemot säljaren, till följd av köpeavtalet, påverkas inte av denna garanti. Garantin kan åberopas i alla länder utanför EU eller USA under förutsättning att ingen nationell lagstiftning begränsar våra villkor för garantin.

Försäkringen om överensstämmelse - CE. Denna enhet är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 89/336/EG. Deklarationen finns på webbplatsen www.bathmate.eu

Innan kassering, vänligen observera respektive lands specifika regler!

Miljöpolicy: Din Bathmate® produkt är utvecklad och tillverkad med högkvalitativa material och den här symbolen visar att ber vi dig att avyttra enheten på din lokala återvinningssentral separat från vanligt avfall i slutet av sin livslängd. Detta bidrar till att skydda den miljö i vilken vi alla lever.

Tack.

Sänk Bathmate®, fortfarande i omvänt läge, och påför över slapp penis. Placera den mot bakenbasen, testiklar utanför.

Du kan nu skapa vakuum på vanligt sätt genom att trycka på Bathmate® mot bakenbasen vilket komprimerar damask bälgan. Du kan också få tryck genom att placera toppen av Bathmate® mot en solid duschvägg och trycka till med höfterna. Obs: Om du har mindre Bathmate®, kan du börja med detta. Att använda Bathmate® på en delvis svullnen/erigerad penis minskar vikten på vattnet i Bathmate®. När du skapar vakuum är det tillrådligt att luta sig bakåt för att mata ut luft som blivit instängd i kammaren.

Montera duschremmen genom att sätta fast den på toppen av Bathmate®. Du kan nu slappna av och duscha medans Bathmate® börjar jobba med att förstöra din penis! Du kan kontinuerligt pumpa enheten för att ge din penis ett bra träningspass och utvidga den. Detta kan göras med duschbandet på plats. När du vill avsluta processen, tryck på ventilen och ta bort Bathmate®.

För att hålla din bathmate® i toppskick rekommenderar vi att du rengör den efter varje användning.

Instruktioner för "bathmate® penis gauge and measure".

"Penis Gauge" ger dig möjlighet att exakt mäta längd och omkrets av din penis i både metrisk och brittiska måttenheter. För att mäta längden på din penis, placera mätstickan vid sidan av penis så den övre kanten på mätaren syns över penis skafte. Du kan nu avläsa längden. Välj vilken sida av mätaren du vill använda för antingen det metrisk eller brittiska måttssystemet. För att mäta omkretsen av din penis, för mätaren framför toppen av din penis tills luckan i den avsmalnande skalan är en ungefärlig jämförelse med din storlek. Nu kan du försiktigt dra mätstickan över penis, säkerställ att det är en något lös passform. Detta ger dig en mätning av din omkrets, som kan läsas i metrisk eller brittiska måttssystemet. **VIKTIGT**, för inte penis upp och ner inuti mätaren eftersom detta kan orsaka ett visst obehag.

Instruktioner för Bathmate® rengöringsborste och utbytbare svamp huvuden.

Bathmate® rengöringsborste är särskilt utformad för att ge bästa möjliga rengöring av Bathmate®'s Hydropump sortiment. Konstruktionen innehåller utbytbara hygieniska svamphuvuden som är profilerade för att passa de interna, svårtillgängliga, delarna i pumpens damask och kammare. Rengöringsborstens design ger användaren möjlighet att hålla i den på två sätt. Ett kort grepp för rengöring av pumpens damask och ett långt grepp när du rengör den inre kammaren samt de inre ventildelarna. Att ta bort den använda svamphuvudet är enkelt. Dra ut svampen i en rät vinkel från det böjda skaftet. För att ersätta med ett nytt svamphuvud komprimera svampen mellan två fingrar och placera svampen i skaftets huvud så att den sticker ut lika mycket på varje sida. Vänligen läs de fullständiga rengöringsinstruktionerna för att få ut mesta möjliga av din Bathmate® Hydropump.

Varning!

- Överskrid inte den maximala användningstiden på tjugo minuter! Orsaka dig inte obehag. Om du inte är nöjd med positionering, passform eller tätning, ta loss enheten och påför den igen
- Utveckling av penis antingen genom träning eller utveckling kan endast erhållas genom tid och tålmod hos användaren i fråga. Mirakelmedel finns inte och de företag som säger att detta, lovar ofta enorma vinster inom bara några dagar eller veckor. Ta tid på dig, slappna av och njut av Bathmate® upplevelsen.